

Boîte à instruments en ABS perforée 18 cm

Boîte à instruments en ABS perforée, incassable, indéformable avec système de bossage inversé, autoclavable, disponible en ivoire ou vert. Garantie 1 an.



Marque :Newmed

Référence :G000259

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Coloris ivoire (+ 34,90€), Coloris vert (+ 34,90€)

DESCRIPTION

Boîte à instruments en ABS perforée 18 cm

Boîte à instruments en ABS perforée, incassable, indéformable avec système de bossage inversé, autoclavable, disponible en ivoire ou vert. Dimensions : 18 x 8 x 3 cm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 1/2 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

1 an

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références :

Ivoire Vert

Réf article

PMD Médical

BO 18309

BO 18910

Réf fabricant

Promotal

BSFP ivoire

BSFP vert

Précautions d'emploi :

Nettoyage

Respecter scrupuleusement les recommandations du fabricant concernant les produits de nettoyage (concentration du produit et durée de trempage) Nettoyer vos instruments neufs avant leur première utilisation et stérilisation Démonter les instruments articulés ou en plusieurs pièces et ouvrir les instruments à crémaillère avant nettoyage. Les instruments rouillés doivent être isolés et traités séparément (à éliminer ou à retourner chez le fabricant pour une nouvelle passivation) Nettoyage manuel : après chaque utilisation, nettoyer vos instruments à l'eau tiède savonneuse, avec une brosse souple. Eviter l'utilisation de tous produits abrasifs, brosses métalliques. Nettoyage à ultrasons : la plus efficace des méthodes. Ne pas mélanger dans la cuve avec des instruments de métaux différents.

Désinfection

L'utilisation d'un produit désinfectant traditionnel comme un détergent neutre (PH 7-8) en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant (concentration du produit et durée de trempage). Ne pas utiliser de décontaminant acide PH<7 La désinfection chimique. (Maximum 65°C) La désinfection thermique à une température maximale de 95°C. Eviter tout usage de produits corrosifs (javel, chlore...)

Stérilisation

Stérilisation à vapeur d'eau (Autoclave) :

Température : 134°C

Durée : variable selon les instruments et leur emballage

[Lien vers la fiche du produit](#)