

Détergent pré-désinfectant Aniosyme X3

Détergent pré-désinfectant pour les instruments médico-chirurgicaux et d'endoscopie, bactéricide, levuricide et virucide. Livraison 24/48h.



Marque :ANIOS

Référence :G000052

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Flacon de 1 litre (+ 22,00€), Boîte 50 doses 0,25ml (+ 36,00€), Bidon de 5 litres (+ 86,00€)

DESCRIPTION

Détergent pré-désinfectant Aniosyme X3

Le détergent pré-désinfectant Aniosyme X3 permet le nettoyage renforcé et à la pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale et du matériel endoscopique. Il est idéal pour le nettoyage en cas à ultrasons. Ce détergent est :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727 : 5 min à 0,5% **Levuricide :** EN 1275, EN 13624, EN 14562 : 5 min à 0.5% **Virucide :** Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus : en 5mn à 0,5%.

Disponible en flacon doseur de 1L, en bidon de 5L et en boîte de 50 doses de 0,25 ml.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Livraison 24/48h.

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :

Carbonate d'ammonium quaternaire, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, amylase et mannanase), agent séquestrant, parfum, colorant, excipients.

Précautions d'emploi :

Contient du propionate de N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammonium et de l'alcools, C8-10, ethoxlated. Peut provoquer une réaction allergique. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. Utiliser dans des zones bien ventilées. Porter des gants de protection, des vêtements et un équipement de protection des yeux/visage.

Mode d'emploi :

Diluer à 0,5 % : verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède. Immerger complètement le dispositif médical (temps de trempage conseillé : 5 min). Brosser si nécessaire. Pour le matériel endoscopique : procéder à un double nettoyage de 10 et 5 minutes. Ecouvillonner. Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique). Pour le matériel endoscopique nettoyer l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical. Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

Références :

Flacon 1L

Bidon 5L

Dose 0,25 ml

Réf article

PMD Médical

AX 21010

AX 2105

AX 2125

Réf fabricant

Anios

2633095UG

2633036UG

2633097FG

DOCUMENTATION

[Plaquette >>](#)

[Fiche produit >>](#)

[Fiche technique >>](#)

[Fiche d'utilisation >>](#)

Prix promotionnel

20,00€ dès 4 unités achetées

[Lien vers la fiche du produit](#)