

## Fil de suture résorbable Ethicon Monocryl Plus

Fil de suture résorbable incolore ou violet en poliglécaprone 25, monofilament protégé contre la colonisation bactérienne. Résorption complète à 91-119 jours. Livraison 24/48h.



**Marque :**ETHICON

**Référence :**G000140

**Prix :**0,00€

### Options disponibles :

*Versions possibles :* Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 70cm - Boîte de 36 ,  
Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 45cm - Boîte de 12 (+ 85,00€), Diamètre 5/0 dec 1 -  
Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 12 (+ 95,00€), Diamètre 2/0 dec 3 - Aiguille  
Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 250,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C  
19mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 250,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm -  
Boîte de 36 (+ 250,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+  
250,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 70cm - Boîte de 36 (+ 280,00€)

## DESCRIPTION

### Fil de suture résorbable Ethicon Monocryl Plus

Le fil de suture résorbable Ethicon Monocryl Plus est un monofil en poliglécaprone 25 (copolymère de glycolate et d'ε-caprolactone) soumis à une enduction d'IRGACARE® MP (antiseptique de la famille des phénols). Il est le premier

monofilament protégé contre la colonisation bactérienne et réduit de manière significative les risques d'ISO par :

Escherichia Coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus et epidermidis résistants ou non à la méticilline

Ce **fil de suture Ethicon** offre une bonne plasticité, une bonne résistance et permet l'absence de mémoire grâce à son conditionnement ZIPPER. Il est recommandé pour la coaptation et/ou la ligature des tissus mous, lorsque l'utilisation d'un fil résorbable est indiquée. Sa résorption est complète à 91-119 jours.

Monocryl Plus violet est idéal pour la chirurgie des tissus fragiles (résistance nulle à 28 jours d'implantation) tandis que Monocryl Plus incolore s'utilise pour le surjet intradermique.

Résistance à la traction :

- violet : 60% à 7 jours et 30% à 21 jours

- incolore : 50% à 7 jours et 20% à 14 jours

Durée avant péremption : 2 ans

CE 01651 - produit de classe III. Conditionné en boîte de 36.

## **Tous les fils de suture Monocryl Plus d'Ethicon**

> Découvrir tous les fils de suture [Monocryl Antibactérien d'Ethicon](#).

## **Les privilèges PMD Médical**

### **Livraison des fils de suture Monocryl Plus d'Ethicon**

Fils de suture Monocryl Plus en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats Ethicon, partout en France.

### **Conditions SAV pour mon fil de suture Monocryl Plus d'Ethicon**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture Monocryl Plus d'Ethicon. Les fils Monocryl Plus ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

### **Précautions d'emploi :**

Le Monocryl Plus INCOLORE ne doit pas être utilisé pour la fermeture abdominale ou pour fermer des tissus aponévrotiques. La sécurité d'emploi et l'efficacité des fils de suture MONOCRYL Plus n'ont pas été établies dans les domaines suivants : tissus nerveux ou cardio-vasculaires, micro-chirurgie et chirurgie ophtalmologique. Durée de validité : 2 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Ces fils de suture sont contre-indiqués chez les malades âgés, dénutris ou débilités ainsi que chez ceux présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation. Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. Dans la mesure où le fil de suture MONOCRYL Plus est un matériau résorbable, il peut se comporter transitoirement comme un corps étranger. Le fil de suture MONOCRYL Plus étant résorbable, le chirurgien peut envisager d'utiliser en complément des sutures non résorbables s'il s'agit de lésions susceptibles de se trouver en tension ou nécessitant un renfort. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de sept jours peuvent entraîner une irritation locale et seront retirées si nécessaire. Les sutures intracutanées seront posées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagne généralement le processus de résorption. Dans certaines circonstances, notamment les procédés de chirurgie orthopédique, une immobilisation par un procédé de contention externe peut être utilisée à la discrétion du chirurgien. Il convient d'être prudent en cas d'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués car il existe alors un risque de rejet de la suture et de retard de résorption. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte aiguille. La garantie d'un nœud fiable est basée sur l'utilisation de nœud plat et de double-nœud ainsi que de nœuds supplémentaires si le chirurgien l'estime nécessaire. Il est particulièrement recommandé de faire des nœuds supplémentaires avec les monofilaments. Saisir l'aiguille dans l'espace se situant du tiers à la moitié du corps, côté fil. Ne pas pincer la pointe ce qui pourrait modifier les caractéristiques de pénétration de l'aiguille et la casser. Ne pas saisir l'aiguille par la zone de sertissage ce qui entraînerait un risque de torsion ou de rupture. Ne pas modifier la forme de l'aiguille afin d'éviter de l'endommager ou de la casser. Eliminer les aiguilles usagées dans un conteneur adapté.

### **Références :**

#### **Référence**

#### **Quantité par boîte**

#### **Longueur fil**

#### **Décimale USP**

#### **Courbure**

#### **Longueur**

#### **Pointe**

#### **Couleur**

MCP 389H

36

70 cm

6/0

3/8

13 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 389H

36

70 cm

5/0

3/8

13 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 3221H

12

45 cm

5/0

3/8

16 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 3209G

12

70 cm

5/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 390H

36

70 cm

4/0

3/8

13 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 4394H

36

70 cm

4/0

3/8

16 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 4422H

36

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 4423H

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 4443H

36

70 cm

2/0

3/8

24 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 457H

36

70 cm

4/0

1/2

17 mm

Triangulaire

Incolore

MCP 495H

36

70 cm

5/0

3/8

19 mm

Multipass

Incolore

MCP 2023H

36

70 cm

5/0

3/8

17 mm

Visiblack

Violet

## **DOCUMENTATION**

[Fiche technique >>](#)

[Gamme Plus >>](#)

### **Prix promotionnel**

Tarifs dégressifs en fonction  
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)