

Fil de suture résorbable incolore Ethicon PDS II

Fil de suture résorbable résistant, incolore, permettant une bonne glisse intratissulaire, résorption dès 90 jours, en boîte de 24 ou 36. Livraison 24/48h.



Marque :ETHICON

Référence :G000143

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 2/0 dec 3 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm - Boîte de 24 (+ 165,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 24 (+ 165,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 24 (+ 165,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm - Boîte de 24 (+ 165,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm - Boîte de 24 (+ 165,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 19mm, fil 45cm - Boîte de 24 (+ 199,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 13mm, fil 45cm - Boîte de 24 (+ 199,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 19mm, fil 45cm - Boîte de 24 (+ 199,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 13mm, fil 45cm - Boîte de 24 (+ 199,00€), Diamètre 6/0 dec 0,7 - Aiguille Pointe Précision - 3/8C 11mm, fil 45cm - Boîte de 24 (+ 199,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Multipass - 3/8C 16mm, fil 45cm - Boîte de 36 (+ 285,00€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Multipass - 3/8C 16mm, fil 45cm - Boîte de 36 (+ 285,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Multipass - 3/8C 19mm, fil 45cm - Boîte de 36 (+ 295,00€)

DESCRIPTION

Fil de suture résorbable incolore Ethicon PDS II

La suture chirurgicale résorbable **Ethicon PDS II** est un monofil en polydioxanone présentant une résistance supérieure au polypropylène et au nylon. Ce fil de suture Ethicon incolore est spécialement recommandé pour les tissus nécessitant une contention prolongée jusqu'à 6 semaines (suture des aponévroses abdominales, tendons, capsules articulaires, tractus digestif, vaisseaux sanguins...).

Ce fil de suture Ethicon offre une bonne glisse intratissulaire et son conditionnement ZIPPER permet une absence de mémoire. Sa résorption est minime jusqu'au 90ème jour environ après l'implantation. Elle est pratiquement totale au bout de 180 à 210 jours. En boîte de 24 ou 36 selon référence. CE 0086 - produit de classe III.

Tous les fils de suture PDSII d'Ethicon

> Découvrir tous les fils de suture [PDS II d'Ethicon](#).

Les privilèges PMD Médical

Livraison des fils de suture PDS II d'Ethicon

Fils de suture PDS II incolore en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats Ethicon, partout en France.

Conditions SAV pour mon fil de suture PDS II incolore d'Ethicon

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture PDS II incolore d'Ethicon. Les fils PDS II incolores ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Durée de vie : 5 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Ne pas utiliser après la date de péremption. Ces fils de suture sont contre-indiqués chez les malades âgés, dénutris ou débilisés ainsi que chez ceux présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation. Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de dix jours peuvent entraîner une irritation locale et seront retirées si nécessaire. Les sutures sous-cutanées seront posées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagne généralement le processus de résorption. Dans certaines circonstances, notamment les procédés de chirurgie orthopédique, une immobilisation par une procédé de contention externe peut être utilisée à la

discrétion du chirurgien. Il convient d'être prudent en cas d'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués car il existe alors un risque de rejet de la suture et de retard de résorption. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte aiguille. Il est particulièrement recommandé de faire des nœuds supplémentaires avec les monofilaments. Saisir l'aiguille dans l'espace se situant du tiers à la moitié du corps, coté fil. Ne pas pincer la pointe ce qui pourrait modifier les caractéristiques de pénétration de l'aiguille et la casser. Ne pas saisir l'aiguille par la zone de sertissage ce qui entrainerait un risque de torsion ou de rupture. L'utilisateur doit prendre les précautions liées à la manipulation d'aiguille afin d'éviter tout risque de blessure. Eliminer les aiguilles usagées dans un conteneur adapté.

Références :

Référence

Quantité par boîte

Longueur fil

Décimale USP

Courbure

Longueur

Pointe

FZ 420E

24

70 cm

5/0

3/8

16 mm

Triangulaire

Z 421E

24

70 cm

5/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Z 422E

24

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Z 423E

24

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

Z 443E

24

70 cm

2/0

3/8

24 mm

Triangulaire

Z 489E

24

45 cm

6/0

3/8

11 mm

Precision

Z 493E

24

45 cm

5/0

3/8

13 mm

Precision

Z 494E

24

45 cm

4/0

3/8

13 mm

Precision

Z 496E

24

45 cm

4/0

3/8

19 mm

Precision

Z 497E

24

45 cm

3/0

3/8

19 mm

Precision

MPZ 501H

36

45 cm

4/0

3/8

16 mm

Multipass

MPZ 497H

36

45 cm

3/0

3/8

19 mm

Multipass

DOCUMENTATION

[Fiche technique >>](#)

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)