

### **Fil de suture résorbable incolore Ethicon PDS Plus**

Suture résorbable avec agent antibactérien, en polydioxanone, longue résistance, bonne glisse intratissulaire, pour le rapprochement des tissus mous. Boîte de 36, livraison 24/48h.



**Marque :**ETHICON

**Référence :**G000144

**Prix :**0,00€

**Options disponibles :**

*Versions possibles :* Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 259,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 70cm (+ 259,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm (+ 259,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 259,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Multipass - 3/8C 13mm, fil 45cm (+ 310,00€)

### **DESCRIPTION**

**Fil de suture résorbable incolore Ethicon PDS Plus**

La suture chirurgicale résorbable **Ethicon PDS Plus** est un monofilament synthétique avec agent antibactérien. Il est composé de polydioxanone avec une enduction d'Irgacare® MP. Son spectre d'efficacité antibactérienne regroupe le Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Methicillin-resistant Staphylococcus epidermis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Il possède une **très longue résistance** pour une résorption lente (résorption complète à 182-238 jours) :

Résistance à la traction :

4-0 et plus petit :

60% à 14 jours 40% à 28 jours 35% à 42 jours

3-0 et plus grand :

80% à 14 jours 70% à 28 jours 60% à 42 jours

Ce fil de suture Ethicon permet le rapprochement des tissus mous, y compris pour les tissus cardiovasculaires pédiatriques, et dans la chirurgie ophtalmique (autre qu'en contact avec la cornée et la sclère). Il est particulièrement recommandé pour les tissus nécessitant une contention prolongée, lorsqu'il est souhaitable d'utiliser une suture résorbable alors qu'un soutien prolongé de plaie est nécessaire (jusqu'à 6 semaines). Il s'utilise sur les aponévroses abdominales, tendons, capsules articulaires, tractus digestif, vaisseaux sanguins... CE 0086 - produit de classe III. Boîte de 36.

## Tous les fils de suture Antibactériens d'Ethicon

> Découvrir tous les fils de suture [PDS Plus d'Ethicon](#).

## Les privilèges PMD Médical

### Livraison des fils de suture PDS Plus d'Ethicon

Fils de suture PDS II incolore en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats Ethicon, partout en France.

### Conditions SAV pour mon fil de suture PDS Plus d'Ethicon

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture PDS antibactérien d'Ethicon. Les fils PDS II Plus ne doivent pas avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## **Précautions d'emploi :**

Ces fils de sutures étant résorbables, ils ne doivent pas être utilisés lorsqu'un rapprochement prolongé de tissus sous tension est nécessaire (au-delà de 6 semaines) ou dans le cadre de la mise en place de prothèses, telles que les valves cardiaques ou les greffons synthétiques. Durée de vie : 2 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Ces fils de suture sont contre-indiqués chez les malades âgés, dénutris ou débilités ainsi que chez ceux présentant une affection entraînant un retard de cicatrisation. Comme avec tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. Dans la mesure où le fil de suture PDS II Plus est un matériau résorbable, il peut se comporter transitoirement comme un corps étranger. Le fil de suture PDS II Plus étant résorbable, le chirurgien peut envisager d'utiliser en complément des sutures non résorbables s'il s'agit de lésions susceptibles de se trouver en tension ou nécessitant un renfort. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de dix jours peuvent entraîner une irritation locale et seront retirées si nécessaire. Les sutures sous-cutanées seront posées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagne généralement le processus de résorption. Dans certaines circonstances, notamment les procédés de chirurgie orthopédique, une immobilisation par un procédé de contention externe peut être utilisée à la discrétion du chirurgien. Il convient d'être prudent en cas d'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués car il existe alors un risque de rejet de la suture et de retard de résorption. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte-aiguille. La garantie d'un nœud fiable est basée sur l'utilisation de nœud plat et de double-nœud ainsi que de nœuds supplémentaires si le chirurgien l'estime nécessaire. Il est particulièrement recommandé de faire des nœuds supplémentaires avec les monofilaments. Saisir l'aiguille dans l'espace se situant du tiers à la moitié du corps, coté fil. Ne pas pincer la pointe ce qui pourrait modifier les caractéristiques de pénétration de l'aiguille et la casser. Ne pas saisir l'aiguille par la zone de sertissage ce qui entraînerait un risque de torsion ou de rupture. Ne pas modifier la forme de l'aiguille afin d'éviter de l'endommager ou de la casser. L'utilisateur doit prendre les précautions liées à la manipulation d'aiguille afin d'éviter tout risque de blessure. Eliminer les aiguilles usagées dans un conteneur adapté.

## **Références :**

### **Référence**

### **Quantité par boîte**

### **Longueur fil**

### **Décimale USP**

### **Courbure**

### **Longueur**

### **Pointe**

PDPZ 420H

36

70 cm

5/0

3/8

16 mm

Triangulaire

PDP 9734H

36

70 cm

4/0

3/8

16 mm

Triangulaire

PDP 397H

36

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

PDP 423H

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

PDP 442H

36

70 cm

3/0

3/8

24 mm

Triangulaire

PDP 494H

36

45 cm

4/0

3/8

13 mm

Multipass

## **DOCUMENTATION**

[Fiche technique >>](#)

[Gamme Plus >>](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)