

Fil de suture résorbable incolore Optime

Fil de suture résorbable tressé, résorption en 60/90 jours par hydrolyse régulière, aiguille résistante à la flexion.
Vendu à l'unité : saisir une quantité de 36 pour une boîte.



Marque :Peters Surgical

Référence :G000126

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 75cm (+ 4,67€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 24mm, fil 75cm (+ 4,67€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 45cm (+ 4,67€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 45cm (+ 4,67€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 75cm (+ 4,67€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 13mm, fil 45cm (+ 4,67€), Diamètre 5/0 dec 1 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 45cm (+ 4,67€), Diamètre 6/0 dec 0,7 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 10mm, fil 45cm (+ 4,67€)

DESCRIPTION

Fil de suture résorbable incolore Optime

Le fil de suture résorbable Optime de Peters Surgical est une tresse d'acide polyglycolique enduite de polycaprolactone et de stéarate de calcium avec un temps de résorption totale de 60 à 90 jours. Ce fil chirurgical allie sécurité, maniabilité et tolérance tissulaire :

Résistance initiale élevée et résorption modérée pendant la période critique de cicatrisation Très bonne tenue aux nœuds
Temps de résistance = 28/35 jours Structure fine à enduction légère (moins de 0.5%) suffisante pour assurer une glisse irréprochable Biocompatibilité exemplaire grâce à une résorption par hydrolyse régulière et répétitive sans réaction inflammatoire majeure.

L'aiguille à pointe triangulaire de ce fil de suture Optime possède une excellente résistance à la flexion et une bonne ductilité grâce à un acier inoxydable de haute performance (aiguilles issues de la chirurgie cardiovasculaire). Le fil chirurgical Optime incolore est adapté pour la chirurgie générale, digestive, gynécologique, urologique, orthopédique. Marquage CE, produit conforme aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Vendu à l'unité, conditionnement conseillé par 36.

Pour une boîte, pensez à saisir une quantité de 36 !

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Précautions d'emploi :

Le fil de suture Peters OPTIME incolore, étant résorbable, ne doit pas être utilisé lorsqu'un maintien prolongé des tissus est exigé et ne doivent pas être utilisées pour des tissus cardio-vasculaires ou nerveux. L'emploi de ces sutures est contre-indiqué chez les patients ayant des antécédents de sensibilité ou d'allergie à leurs composants. Durée de validité : 5 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Stocker à une température inférieure à 25°C, à l'abri de la chaleur directe et de l'humidité. Dans certaines circonstances, en particulier les interventions orthopédiques, une immobilisation par un support externe peut être mise en place à la discrétion du chirurgien. Les sutures cutanées devant rester en place plus de 7 jours peuvent provoquer une irritation localisée, la partie externe doit être détachée lorsque cela est indiqué. Eviter les blessures, les pincements du fil dus aux instruments chirurgicaux tels que pinces ou porte-aiguilles. Les sutures résorbables OPTIME ® sont thermofusibles, faire attention lors de l'utilisation de bistouri électrique ou de laser. Les aiguilles doivent être saisies entre le tiers et la moitié de la distance entre le sertissage et la pointe.

Saisir l'aiguille près de la pointe pourrait altérer les qualités de pénétration de celle-ci et la saisir au chas pourrait entraîner une torsion voire une fracture de l'aiguille à ce niveau. Changer la courbure de l'aiguille peut entraîner une perte de résistance à la torsion et en faciliter la rupture. La sécurité des nœuds exige l'utilisation de la technique chirurgicale classique des nœuds plats, avec boucles additionnelles, selon les besoins de l'intervention et l'expérience du chirurgien.

Références :

Référence

Longueur fil

Décimale USP

Courbure

Longueur

Pointe

OP 06101

45 cm

6/0

3/8

10 mm

Triangulaire

OP 05131

45 cm

5/0

3/8

13 mm

Triangulaire

OP 05161

45 cm

5/0

3/8

16 mm

Triangulaire

OP 04131

45 cm

4/0

3/8

13 mm

Triangulaire

OP 04161

45 cm

4/0

3/8

16 mm

Triangulaire

OP 04191

75 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

OP 03191

75 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

OP 03241

75 cm

3/0

3/8

24 mm

Triangulaire

Prix promotionnel

Tarifs dégressifs en fonction
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)