

### Fil de suture résorbable violet Ethicon Vicryl Plus

Fil tressé enduit d'antiseptique pour microchirurgie vasculaire. Résorption totale après 5 semaines. Boîte de 36.



**Marque :**ETHICON

**Référence :**G000145

**Prix :**0,00€

**Options disponibles :**

*Versions possibles :* Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 3/0 dec 2 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 16mm, fil 70cm (+ 222,00€), Diamètre 4/0 dec 1,5 - Aiguille Triangulaire - 3/8C 19mm, fil 70cm (+ 222,00€)

### DESCRIPTION

#### Fil de suture résorbable violet Ethicon Vicryl Plus

Le fil de suture résorbable Ethicon Vicryl Plus est un fil tressé enduit d'IRGACARE MP. Son efficacité antibactérienne a été démontrée sur :

Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermis MRSA - Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSE - Methicillin-resistant Staphylococcus epidermis

**Cefil pour sutures sous-cutanées** est destiné à la ligature des tissus mous en microchirurgie vasculaire. Sa résorption est totale entre 56-70 jours. Sa résistance à la traction est de 75% à 14 jours, 50% à 21 jours et 25% à 28 jours. CE 0086 - produit de classe III. En boîte de 36.

## Tous les fils de suture résorbables Vicryl Plus d'Ethicon

> Découvrir tous les fils de suture de la gamme [Vicryl Plus d'Ethicon](#).

## Les privilèges PMD Médical

### Livraison des fils de suture résorbable vicryl plus d'Ethicon

**Fils de suture résorbables violet** en stock. 24/48h pour la livraison de vos achats Vicryl d'[Ethicon](#), partout en France.

### Conditions SAV pour mon fil de suture résorbable violet Vicryl Plus d'Ethicon

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison pour nous retourner votre commande de fil de suture vicryl plus d'Ethicon. Les fils de suture résorbables violet vicryl plus ne doivent avoir été déballés et ne pas avoir été utilisés.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Précautions d'emploi :

Le fil VICRYL\* Plus, résorbable, ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante. Le fil VICRYL\* Plus ne doit pas être employé chez les patients présentant des réactions allergiques connues au triclosan. Durée de validité : 3 ans à compter de la date de fabrication. Pour de raisons de protection de santé et d'hygiène ce produit ne peut être ni repris ni échangé après avoir été descellé. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, à l'abri de l'humidité et d'une exposition directe à la chaleur. Comme tout corps étranger, le contact prolongé de la suture avec les milieux salins tels que les urines ou la bile peut entraîner la formation de lithiases. Dans la mesure où le fil VICRYL PLUS est un matériau résorbable, il peut se comporter transitoirement comme un corps toute étranger. L'utilisation du fil VICRYL PLUS ne remplace pas le respect des règles d'hygiène et/ou l'administration d'une antibiothérapie, le cas échéant. Le fil VICRYL PLUS étant résorbable, le chirurgien peut envisager d'utiliser en complément des sutures non résorbables s'il s'agit de lésions susceptibles de se trouver en tension, ou nécessitant un renfort. Les sutures cutanées qui doivent rester en place plus de 7 jours peuvent entraîner une irritation locale. Elles seront coupées ou éliminées si nécessaire. Dans des circonstances particulières comme en orthopédie, l'immobilisation externe des articulations peut être réalisée si le chirurgien le souhaite. L'utilisation de fils de suture résorbables au niveau de tissus mal irrigués peut entraîner un risque de rejet et un retard de résorption de la suture. Les sutures intra-dermiques seront placées aussi profondément que possible afin de minimiser l'érythème et l'induration qui accompagnent généralement le processus de résorption. Ne pas utiliser les fils VICRYL PLUS chez les patients âgés, malnutris ou débilisés, ou chez les patients pouvant présenter un retard de la cicatrisation. Ne pas pincer ou écraser le fil en le prenant dans une pince ou un porte-aiguille.

La préhension doit se faire entre le milieu et le tiers de l'aiguille à partir de la zone de sertissage. Eviter toute prise par la pointe qui entrainerait la modification des caractéristiques de pénétration de l'aiguille et toute prise par la zone de sertissage qui risquerait d'entraîner la flexion ou la rupture de l'aiguille. Ne pas modifier la forme de l'aiguille afin d'éviter de l'endommager ou de la casser. La garantie d'un nœud fiable est basée sur les techniques de nœud plat, de double nœud mais aussi de nœuds supplémentaires si le chirurgien l'estime nécessaire. Les nœuds supplémentaires sont particulièrement recommandés avec les monofilaments

**Références :**

**nce**

**Quantité par boîte**

**Longueur fil**

**Décimal USP**

**Courbure**

**Longueur**

**Pointe**

VCP 394H

36

70 cm

4/0

3/8

16 mm

Triangulaire

VCP 397H

36

70 cm

4/0

3/8

19 mm

Triangulaire

VCP 395H

36

70 cm

3/0

3/8

16 mm

Triangulaire

VCP 398H

36

70 cm

3/0

3/8

19 mm

Triangulaire

## **DOCUMENTATION**

[Fiche technique >>](#)

[Gamme Plus >>](#)

### **Prix promotionnel**

Tarifs dégressifs en fonction  
des quantités commandées

[Lien vers la fiche du produit](#)