

Joint de porte pour autoclave Newmed

Joint de porte étanche en silicone de 27.5 cm de diamètre pour autoclave Newmed. Livraison 24/48h, garantie 1 an.



Marque :Newmed
Référence :JT 6002
Prix :49,00€

DESCRIPTION

Joint de porte pour autoclave Newmed

Joint de porte étanche en silicone de 27.5 cm de diamètre pour autoclave Newmed.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

24/48h

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

1 an

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Références :**

Réf article

PMD Médical

JT 6002

Réf fabricant

Promotal

GUA10004

Précautions d'emploi :

Ouvrir la porte et dévisser les 4 vis selon la photo afin d'enlever le couvercle extérieur en plastique/ en aluminium. Exercer une légère pression sur la calotte à l'intérieur de la porte. Au même temps, desserrer le boulon à l'extérieur de la porte, évitant de le dévisser complètement. Enlever complètement le joint de son siège exerçant une légère traction vers l'extérieur. Insérer le nouveau joint. Le bord de la calotte en acier doit s'insérer parfaitement dans le logement du joint. Exercer une légère pression sur la calotte afin d'éviter sa rotation. Visser le boulon précédemment desserré. Pendant cette opération, il faut vérifier que le joint soit correctement dans le logement de la porte. Visser le boulon jusqu'au complet alignement avec la vis à l'intérieur. Le bloquer avec du silicone sur sa surface extérieure. Vérifier que la calotte ait une légère mobilité le long de l'axe vertical et horizontal en lui soumettant alternativement à des contraintes aux extrémités. En faisant ça, la calotte pourra s'adapter à la surface du bord de la cuve en fermant la porte. Repositionner le couvercle extérieur et vérifier la correcte fermeture de la porte. Remplacer le joint une fois par an.

[Lien vers la fiche du produit](#)