

Pince à dissection 12 cm avec ou sans griffe Adson

Pince à dissection Adson 12 cm stérilisable en inox disponible en plusieurs modèles. Garantie 2 ans.



Référence :G000276

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Modèle avec griffes microfine (+ 16,90€), Modèle sans griffes microfine (+ 16,90€),
Modèle sans griffes standard (+ 12,90€)

DESCRIPTION

Pince à dissection 12 cm avec ou sans griffe Adson

Pince à dissection Adson 12 cm stérilisable en inox disponible en plusieurs modèles.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 1/2 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réf PMD Médical

Réf CIE/COMED

Longueur

Type

PI 0342

342

12 cm

Fine à griffes

PI 23000

C230000

12 cm

Standard à griffes

PI 2320

C230200

12 cm

Standard sans griffes

PI 3431

3431

12 cm

Micro à griffes

PI 3432

3432

12 cm

Micro sans griffes

PI 3442

342

12 cm

Standard à griffes

PI 3443

343

12 cm

Standard sans griffes

Précautions d'emploi :

Nettoyer vos instruments neufs avant leur première utilisation et stérilisation. Les instruments rouillés doivent être isolés et traités séparément (à éliminer ou à retourner chez le fabricant pour une nouvelle passivation). Éviter l'utilisation de tous produits abrasifs, brosses métalliques. Ne pas mélanger des instruments de métaux différents dans la cuve. ne pas nettoyer à l'eau de javel ou produits corrosifs (chlore, chlorures, fluor)
Ne pas utiliser de décontaminant acide PH<7

Désinfection

3 méthodes possibles :

L'utilisation d'un produit désinfectant traditionnel par exemple un détergent neutre (PH 7-8) en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant (concentration du produit et durée de trempage).
La désinfection chimique (maximum 65°C). La désinfection thermique (maximum 95°C).

Stérilisation

Stérilisation à air chaud (POUPINEL)

Température : 180°C

Durée : Minimum 10 à 15 mn / Maximum : 45 à 60 mn

Stérilisation à vapeur d'eau (Autoclave) :

Température : 134°C

Durée : variable selon les instruments et leur emballage.

[Lien vers la fiche du produit](#)