

Porte-aiguille Olsen-Hegar Tungstène 12 ou 14 cm

Porte-aiguille avec ciseaux d'Olsen-Hegar mors en Tungstène disponible en plusieurs tailles, stérilisable. 12 ou 14 cm. Garantie 2 ans.



Référence :G000257

Prix :0,00€

Options disponibles :

Versions possibles : Longueur 120mm (+ 109,90€), Longueur 140mm (+ 109,90€)

DESCRIPTION

Porte-aiguille Olsen-Hegar Tungstène 12 ou 14 cm

Porte-aiguille avec ciseaux d'Olsen-Hegar mors en Tungstène disponible en plusieurs tailles, pour une manipulation plus aisée et sécurisée de l'aiguille à suture, stérilisable. 12 ou 14 cm.

Les privilèges PMD Médical :

Livraison :

Sur demande (délai indicatif 1/2 semaines)

Conditions SAV :

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

Garantie :

2 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**Réf PMD Médical****Réf CIE****Longueur****Poids**

BM 30122

NT 950

12 cm

31 g

BM 30124

NT 951

14 cm

33 g

Précautions d'emploi :

Nettoyer vos instruments neufs avant leur première utilisation et stérilisation. Les instruments rouillés doivent être isolés et traités séparément (à éliminer ou à retourner chez le fabricant pour une nouvelle passivation). Eviter l'utilisation de tous produits abrasifs, brosses métalliques. Ne pas mélanger des instruments de métaux différents dans la cuve. ne pas nettoyer à l'eau de javel ou produits corrosifs (chlore, chlorures, fluor) Ne pas utiliser de décontaminant acide PH<7

Désinfection

3 méthodes possibles :

L'utilisation d'un produit désinfectant traditionnel par exemple un détergent neutre (PH 7-8) en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant (concentration du produit et durée de trempage). La désinfection chimique (maximum 65°C). La désinfection thermique (maximum 95°C).

Stérilisation

Stérilisation à air chaud (POUPINEL)

Température : 180°C

Durée : Minimum 10 à 15 mn / Maximum : 45 à 60 mn

Stérilisation à vapeur d'eau (Autoclave) :

Température : 134°C

Durée : variable selon les instruments et leur emballage.

[Lien vers la fiche du produit](#)