

## Spray d'azote liquide CryoPro

Spray fourni avec 5 buses de pulvérisation de 0.45 à 1 mm d'ouverture, disponible en 500 ou 350 ml. Garantie 3 ans.



**Marque :**Cortex

**Référence :**G000378

**Prix :**0,00€

**Options disponibles :**

*Versions possibles :* Contenance 0,3 litres (+ 875,00€), Contenance 0,5 litres (+ 895,00€)

### DESCRIPTION

## Spray d'azote liquide CryoPro

Le spray d'azote liquide CryoPro offre une performance remarquable en termes de sécurité, facilité d'utilisation et fiabilité. Ce traitement par cryothérapie permet une intervention fiable grâce à sa composition en matériau de qualité et un contrôle strict durant toutes les étapes de production et grâce à de nombreux atouts :

température basse fort pouvoir de guérison résultats esthétiques excellents

Le CryoPro est fourni avec un ensemble standard de buses de pulvérisation (de 0.45 à 1 mm d'ouverture) pour une congélation par pulvérisation et de sondes de contact planes pour un refroidissement par contact direct. Toutes les buses et sondes sont vissées à la force de la main sur un écrou fileté et fixé de façon permanente :

Buse «A» (ouverture 1mm) et «B» (ouverture 0,75 mm) pour les lésions étendues et en profondeur ou pour les desquamations superficielles de la peau ; Buse «C» (ouverture 0,55 mm) recommandées pour les verrues et kératoses Buse «D» (ouverture 0,45 mm) pour les petites verrues et les lésions provenant de kératoses. Buse à « pulvérisateur incurvé » (ouverture 0,55 mm) pour les surfaces difficiles à atteindre comme derrière les oreilles, les lèvres, et la partie externe du nez (évitant la pénétration de gaz dans les voies nasales).

CryoPro est disponible en version Maxi avec une capacité de 500 ml et en Mini avec une capacité de 350 ml.

**Les privilèges PMD Médical :**

**Livraison :**

7 jours

**Conditions SAV :**

Vous disposez d'[un droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison.

**Garantie :**

3 ans

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

## Références :

Mini

Maxi

Réf article

PMD Médical

CY 3500

CY 5500

Réf fabricant

Cortex Technology

401098

401098

## Précautions d'emploi :

Ne jamais utiliser le CryoPro® sans avoir préalablement installé soit une buse de pulvérisation soit une sonde de contact. Le capot supérieur doit être mis en marche et bien serré après le remplissage. Le CryoPro® est supposé être maintenu à la verticale pendant son utilisation. L'azote liquide peut s'échapper à travers la soupape de sécurité si le CryoPro® est utilisé dans une position telle que le liquide à l'intérieur de la bouteille soit en contact avec le bouchon. Redressez le CryoPro® dans une position plus verticale si le liquide commence à sortir de la soupape de sécurité. L'angle maximum d'utilisation dépend de la quantité de liquide à l'intérieur de la bouteille. Soyez vigilants lorsque vous ouvrez un CryoPro® pressurisé. Dévissez la tête lentement. Le CryoPro® peut être encore pressurisé même s'il n'y a plus de liquide résiduel. Le CryoPro® est un appareil chirurgical. Hors utilisation il doit être mis hors de portée des enfants et du personnel non autorisé.

[Lien vers la fiche du produit](#)