


TSK Needle Holder – Porte aiguille hypodermique

Avec le « TSK Needle Holder» améliorez votre sécurité en limitant le risque de piqure et en améliorant le serrage de l'aiguille et de la seringue. Un résultat propre et organisé.

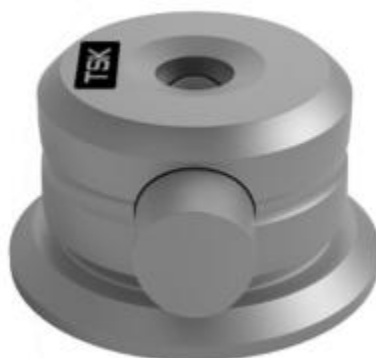

Marque :TSK

Référence :NH 0001

Prix :75,00€

DESCRIPTION

TSK Needle Holder, l'accessoire sécurité pour vos injections signé TSK

Prévenez les risques de blessure par aiguille, équipez-vous d'un porte aiguille hypodermique TSK.

TSK, référence mondiale dans le domaine des aiguilles de haute précision, propose le TSK Needle Holder. Le but de ce porte aiguille est de prévenir les risques de piqure lors de la manipulation d'une aiguille hypodermique.

Prévention du risque de blessure par aiguille hypodermique, Un assemblage aiguille / seringue plus serré, Une vision du travail propre et très organisé.

Comment fonctionne le TSK Needle Holder?

Positionnez le TSK Needle Holder sur une surface plane, Insérez la capsule contenant l'aiguille, sans l'ouvrir, la seringue vient se bloquer dans le TSK Needle Holder Dévissez le couvercle de protection de l'aiguille, Insérer la seringue dans l'aiguille, Tournez votre seringue pour venir fixer l'aiguille.

Une fois l'injection faite :

Repositionnez l'aiguille dans sa capsule de protection, qui est toujours dans le TSK Needle Holder, Dévissez la seringue, Recapuchonnez la capsule de protection.

Grâce au TSK Needle Holder, tout est fait pour permettre un assemblage de l'aiguille et de la seringue sans contact, limitant ainsi drastiquement le risque de blessure par aiguille hypodermique.

Commandez le TSK Needle Holder chez PMD MÉDICAL

En passant commande chez PMD MÉDICAL du TSK Needle Holder, bénéficiez de l'ensemble des avantages PMD MÉDICAL avec une livraison express et des conditions de reprise améliorées.

Livraison rapide

Passez commande de votre TSK Needle Holder, et faites-vous livrer sous 24/48h selon votre zone géographique.

Conditions SAV

Vous disposez d'un [droit de rétractation de 15 jours](#) à compter du jour de la livraison. Le produit ne doit pas être ouvert, présenter un état neuf et être retourné dans son emballage d'origine.

CARACTÉRISTIQUES

Références :

Réf article

PMD Médical

NH 0001

Réf fabricant

TSK

NH-1

[Lien vers la fiche du produit](#)